

UN SEUL ECOUVILLON = ECOUVILLON ESWAB

Bouchon ROSE = prélèvements vaginaux, cutanés, ORL



Bouchon ORANGE = prélèvements urétraux

MATERIEL

- ⇒ Ecouvillon de prélèvement avec embout floqué avec des fibres de nylon
- ⇒ Milieu de transport AMIES liquide
- ⇒ Les écouvillons sont fournis sur demande par votre laboratoire ALLIANCE ANABIO

INDICATIONS

- ⇒ bactériologie classique (bactéries aérobies, anaérobies, y compris gonocoque)
- ⇒ mycologie
- ⇒ recherche de mycoplasmes
- ⇒ recherche par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*

CONSERVATION

- ⇒ 48h à température ambiante sauf pour *Neisseria gonorrhoeae* 24h

REALISATION DU PRELEVEMENT

- ⇒ Ecouvillonner le site à prélever.
- ⇒ Introduire l'écouvillon dans le tube, le casser en le pliant. Fermer le tube.
- ⇒ Identifier le tube et remplir la fiche de transmission de prélèvement fournie avec les écouvillons

Notes pour les prélèvements vaginaux :

- ✓ Prélever au niveau de l'endocol et des culs de sacs vaginaux avec le même écouvillon.
- ✓ A noter : l'auto-prélèvement par les patientes n'est validé que
 - pour la recherche par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*
 - chez la femme enceinte, pour toutes les recherches

Notes pour la recherche par PCR de *C trachomatis*, *N gonorrhoeae* et *M genitalium* :

- ✓ Chez la femme, privilégier la recherche sur prélèvement vaginal
- ✓ Chez l'homme, privilégier la recherche sur 1^{er} jet urinaire

