

UN SEUL ECOUVILLON = ECOUVILLON ESWAB



Bouchon ROSE = prélèvements vaginaux, cutanés, ORL



Bouchon ORANGE = prélèvements urétraux

MATERIEL :

- ⇒ Ecouvillon de prélèvement avec embout floqué avec des fibres de nylon
- ⇒ Milieu de transport AMIES liquide
- ⇒ Les écouvillons sont fournis sur demande par votre laboratoire ALLIANCE ANABIO

INDICATIONS :

- ⇒ bactériologie classique (bactéries aérobies, anaérobies, y compris gonocoque)
- ⇒ mycologie
- ⇒ recherche de mycoplasmes
- ⇒ biologie moléculaire = recherche de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium* par PCR

CONSERVATION :

- ⇒ 48h à température ambiante sauf pour *Neisseria gonorrhoeae* 24h

REALISATION DU PRELEVEMENT

- ⇒ Ecouvillonner le site à prélever.
- ⇒ Introduire l'écouvillon dans le tube, le casser en le pliant. Fermer le tube
- ⇒ Identifier l'écouvillon

Note pour les prélèvements vaginaux :

- Prélever au niveau de l'endocol et des culs de sacs vaginaux avec le même écouvillon.
- A noter : l'auto prélèvement par les patientes est validé pour la biologie moléculaire et la recherche de streptocoque de groupe B chez la femme enceinte

